


speCtra® Guía para el tamaño de embudo

Imprima esta hoja a escala del 100% para mayor precisión. Corta a lo largo de las líneas de puntos para medir el diámetro de tu pezón. Asegúrese de medir ANTES de sacarse leche.

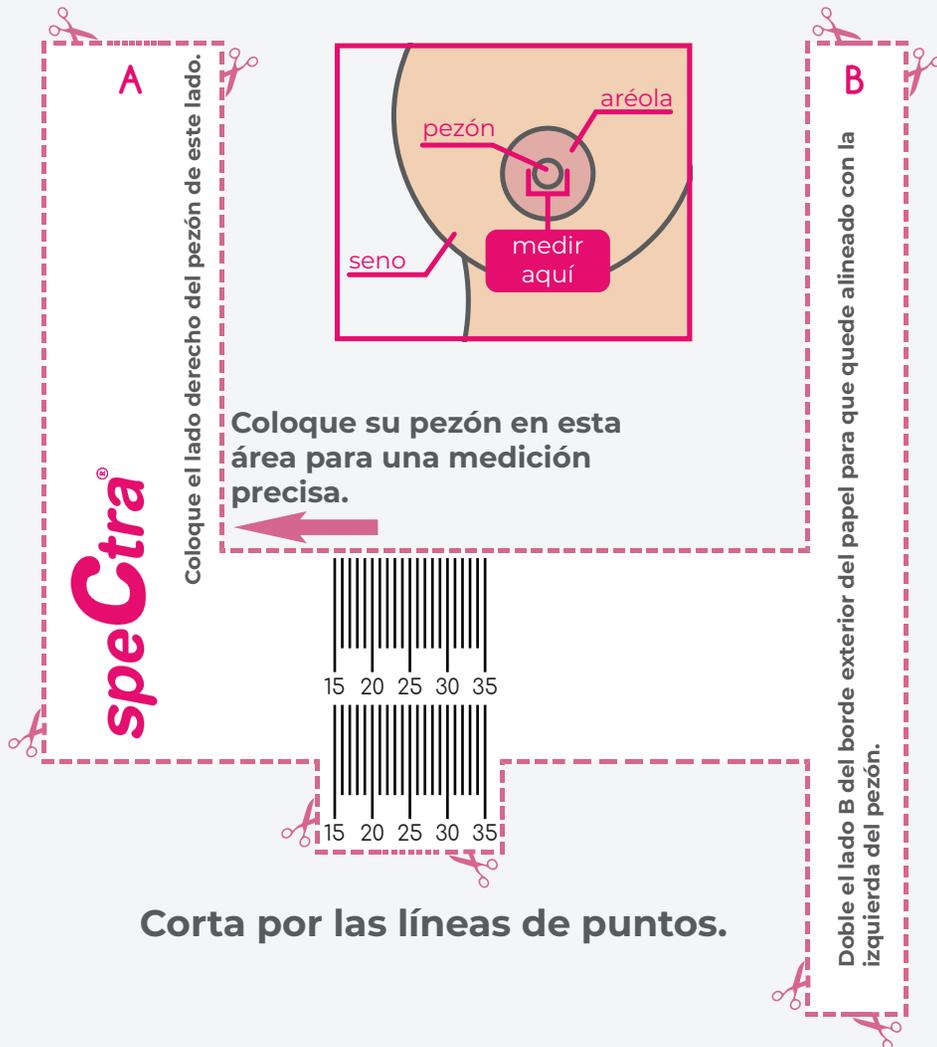

El tamaño de su embudo debe ser 2-3mm más grande que el diámetro de su pezón

Si siente dolor o malestar, o necesita más ayuda con el tamaño, contáctenos ibclc@spectrababyusa.com



APOYO PARA LA LACTANCIA DISPONIBLE SE HABLA ESPAÑOL



Spectra Baby USA
3430 Davie Rd. Ste. 306



Davie, FL 33314



1-855.405.0993

SpectraBabyUSA.com

